

ESPECIFICACIONES – INSTRUCCIONES DE USO

REFERENCIA PRODUCTO	PARAMEDIC 50 PL – 1
NOMBRE PRODUCTO	Parafina Rehabilitación.
PACKING	Caja 10 Kgs con 10 Unidades de 1 kg.
ID-SRN (EUDAMED)	ESMF-00001731

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	LIMITES		MÉTODO
		Min.	Máx.	
Punto de Fusión	°C	46	50	ASTM D 87
Penetración a 25°C	1/10 mm.	16	17	ASTM D 1321
Contenido en aceite.	%	1,0	2,0	ASTM D 721
Color Saybolt	-	+25		ASTM D 156
Olor	-		Nulo	ASTM D 1833
FDA			OK	21 CFR 172.886
Nº CAS		64742 – 51 – 4		
Nº EINCECS		265 – 154 - 5		

INSTRUCCIONES DE USO

La parafina es un producto sanitario utilizado para tratamientos de Estética y en tratamientos de Fisioterapia. La parafina líquida, al ser expuesta al aire se solidifica de inmediato, pero conserva por algún tiempo el calor, y se vuelve aislante cuando se solidifica. Estas propiedades la que se emplea para su aplicación terapéutica.

Se emplea la parafina en tratamientos de Estética a nivel de la piel para tratar la piel seca. El efecto del calor húmedo de la parafina se transmite al cuerpo de la persona hidratando las capas más profundas de la dermis. Se puede poner esencias en la parafina con el fin de armonizar el bienestar del/de la paciente.

Se emplea baños de parafina para la recuperación funcional en Fisioterapia mediante el calentamiento de los músculos de la zona a rehabilitar. Una vez calentado los músculos, el/la fisioterapeuta puede iniciar los ejercicios de rehabilitación para tratar la zona afectada. Siendo también un tratamiento analgésico para combatir el dolor.

Fundir la parafina en un calentador indicado para este uso y con termostato para control de la temperatura. Esperar hasta la fusión completa de la parafina. Comprobar la temperatura de aplicación mediante termómetro o con el termostato del fundidor. Si la temperatura es adecuada y no puede producir quemaduras al paciente, en este momento se puede empezar el tratamiento.

Para los tratamientos dérmicos, aplicar la parafina con una gasa estéril o compresas quirúrgicas en el rostro o un film u otro soporte en codos, brazos, rodillas, piernas, hombros, espalda y abdomen. Aplicar varias capas hasta el grosor de parafina deseado. Hay que proteger las zonas de los ojos y los labios en los tratamientos faciales, mediante gasas humedecidas con agua. Cubrir la parafina con paños, toallas o mantas para conseguir que la temperatura se mantenga. Dejar actuar unos veinte minutos, retirar la parafina, y aplicar una crema hidratante mediante un masaje.

Para los tratamientos de manos y pies, se sumergen éstos en el baño de parafina hasta conseguir el grosor de parafina deseado. Cubrir las manos o pies con bolsas de plástico y con paños o mantas para conseguir que la temperatura se mantenga. Dejar actuar unos veinte minutos, retirar la parafina, y aplicar una crema hidratante mediante un masaje.

La parafina debe emplearse una sola vez y desecharla por motivos de higiene.

El tratamiento con parafina está contraindicado cuando existe lesiones en la piel como son heridas abiertas, llagas, quemaduras.