
Accesorio HMD


La revolución de una evolución






Gracias al nuevo accesorio HMD, Tethys H10 se convierte también en una termodesinfectadora para piezas de mano


Empleando este nuevo accesorio será posible lavar, termodesinfectar y secar hasta 6 instrumentos (turbinas o piezas de mano para micromotor) simultáneamente. Puede utilizarse en todos los dispositivos Tethys H10, aunque ya estén instalados: solo será necesario realizar una actualización del firmware para hacer todavía más completa la termodesinfectadora.

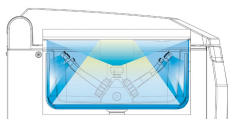


Fase 1 - Lavado

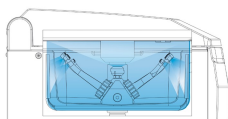

Fase 2 - Enjuague

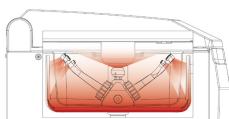

Fase 3 - Termodesinfección

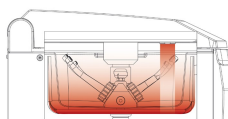

Fase 4 - Secado

Ciclo piezas de mano

Con el nuevo ciclo de piezas de mano y el uso del soporte correspondiente, en tan solo 34 minutos se podrá efectuar un ciclo compuesto por:

- Lavado interno y externo (sin ultrasonidos)
- Termodesinfección
- Secado





Máxima flexibilidad

El soporte se podrá montar y desmontar fácilmente para permitir el uso del cestillo tradicional y mantener la función original de Tethys H10 de termodesinfectadora con ultrasonidos.



Adaptadores para cualquier necesidad

HMD permite tratar:

- Piezas de mano para micromotor
- Turbinas
- Puntas para ultrasonidos

Simplemente inserte el adaptador específico para la familia de instrumentos, con el fin de garantizar una limpieza adecuada del instrumento.